

# ProLink™ CEM Primer


PRIMER FOR ZIRCONIA & GLASS CERAMIC




פרולינק סם פריימר נועד לטפל בפני השטח של זירקוניה, אלומינה ומתכת. על מנת לייצר חוזק הדבקה אופטימלי. חומר בסיס חד-רכיבי המשמש לשיפור הדבקה בין חומרי שיקום עקפים לצמנט מרוכב (קומפוזיט). החומר יכול לשמש כטיפול שטח עבור זירקוניה ואלומינה קרמיקה תחמוצת מתכת, כמו גם סוגים אחרים של מתכות/סגסוגות, חומרים מרוכבים ופוסטים אנדודונטיים. פרולינק סם פריימר פותח במיוחד עבור הדבקה גבוהה בריפוי (קירוינג) עצמי וגם באור. מה שהופך אותו למושלם לשיקום מתמשך.

- נוסחה עם MDP לחוזק קשר משופר מוכח.
- קבוק בודד, מוכן לשימוש.
- אין צורך בקירור.
- מתאים לעבודה עם צמנטים בריפוי (קירוינג) עצמי וגם בריפוי (קירוינג) באור.

חוזק הדבקה ממוצע של פריימרים לזירקוניה עם קומפוזיט מתאים.

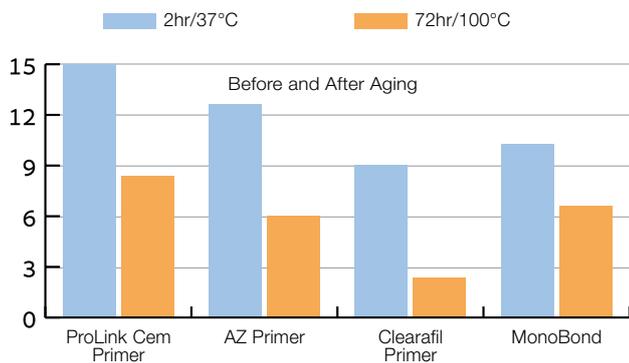

חוזק הדבקה של צמנט מרוכב (קומפוזיט) פרולינק לחומרים שונים.

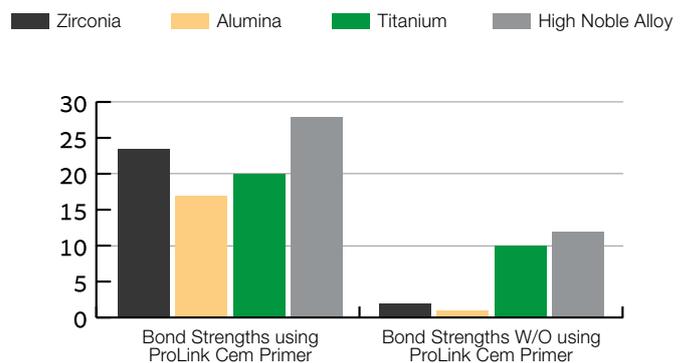

מחקרים מראים כי ישום פריימר עם MDP לאחר התזת חול על הרסטורציה מגדיל את כוח ההדבקה.

שמירה על עמידות ההדבקה לאורך זמן בשימוש בפריימר המכיל MDP

מגדיל את כוח ההדבקה לזירקוניה ב 120% ולמתכת ב 25%

פרולינק סם פריימר משתמש ב MDP להשגת כוח הדבקה אופטימלי.

פרולינק סם פריימר מפחית התנתקות ושברים של כתרים.

פרולינק סם פריימר הוא פריימר אפקטיבי למגוון משטחים.

הוראות שימוש


להמשיך בסמנטציה.



יש למרוח 1-2 שכבות של פרולינק סם פריימר באופן אחיד. להשאיר ללא הפרעה למשך כ 60 שניות ואז לייבש באוויר.



יש לנקות את שטח הפנימי של הרסטורציה, לשטוף ולייבש באוויר.

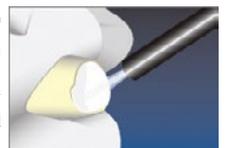

כמות  
נוזל (5 מ"ל)

מספר קטלוגי  
150501-P

תיאור  
ProLink Cem Primer